



linha hospitalar

BOLETIM TÉCNICO

CJORIN HC

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos

REGISTRO Nº 352150060 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Desenvolvido à base de hipoclorito de sódio, é comprovadamente eficaz contra os micro-organismos patogênicos *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Salmonella choleraesuis*.

INDICAÇÃO:

Possui amplo espectro de ação, indicado para a limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Indicado para áreas de assistência à saúde, como consultórios, clínicas médicas, odontológicas e hospitais.

RESTRIÇÃO:

Não misturar com outros produtos; a mistura com ácidos ou produtos à base de amônia produz gases tóxicos.

MODO DE USAR:

Preparar a solução, conforme diluição recomendada, somente quando for utilizá-la.

Desinfecção de superfícies fixas: limpar e secar a superfície e, na sequência, aplicar o produto, deixando-o agir por 5 minutos;

Desinfecção de artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Em seguida, imergir na solução do produto, deixando-o agir por 5 minutos. Enxaguar e secar os artigos, devendo ser utilizado o mais breve possível.

DILUIÇÃO:

Proporção (produto:água)	Ação
Pronto uso	Limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Amarelo
Odor:	Característico
pH:	de 12,0 a 13,0
Viscosidade (cP):	de 19,0 a 21,0
Peso específico (g.cm ⁻³):	de 1,0200 a 1,0500
Composição:	Ativo, alcalinizante e veículo
Princípio ativo:	Hipoclorito de sódio
Teor de ativo (%):	1,0

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

6 meses

EMBALAGEM:

Galão 5 litros

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Não ingerir. Usar luvas, botas e óculos de proteção para sua aplicação. Evitar inalação ou aspiração. Evitar o contato com a pele e olhos.

Atualizado por: Matheus R.Sanches 08/09/2020