



linha hospitalar

BOLETIM TÉCNICO

# XP 500 HC

Detergente para uso geral  
Assistência à saúde

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N. 25351.144742/2020-49/ Aut. Func. / M.S. 3.05215-1

## INDICAÇÃO:

Detergente concentrado desenvolvido com tensoativos biodegradáveis, XP 500 HC proporciona uma limpeza altamente eficiente em todos os tipos de superfícies laváveis, incluindo alumínio, plástico e inox. Indicado para a lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, materiais de laboratórios e odontológicos, XP 500 HC ainda possui a versatilidade de poder ser aplicado em pisos, azulejos, mesas e bancadas.

## RESTRIÇÃO:

Restrito à áreas prestadoras de assistência à saúde.

## MODO DE USAR:

Aplicar o produto seguindo a diluição recomendada, esfregar as superfícies a serem limpas e finalizar com o enxágue com água corrente.

## DILUIÇÃO:

Diluir o produto em água na proporção 1:80 (uma parte de produto para 79 partes de água).

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>Aspecto:</b>	Líquido
<b>Cor:</b>	Incolor
<b>Odor:</b>	Característico
<b>pH:</b>	de 8,0 a 9,5
<b>Peso específico (g.cm<sup>-3</sup>):</b>	de 1,0100 a 1,0300
<b>Composição:</b>	Ativo, lauril éter sulfato de sódio, dietanolamina cocamida, espessante, desnaturante, conservante e água.
<b>Viscosidade (cP):</b>	330,0 a 2360,0
<b>Princípio ativo:</b>	Ácido Sulfônico

## VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

## EMBALAGEM:

Galão 5 litros

## ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Não ingerir. Evite aspiração, contato com os olhos e contato prolongado com a pele.

Atualizado por: Matheus R. Sanches 09/11/2021