



linha hospitalar

BOLETIM TÉCNICO

# SURF EXPRESS

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos  
Álcool 70%

REGISTRO nº 352150061 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Desinfetante à base de álcool etílico 70%, Surf Express é indicado para aplicação em todos os tipos de superfícies.

## INDICAÇÃO:

Possui amplo espectro de ação, indicado para a limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Deve ser utilizado em áreas de assistência à saúde, como consultórios, clínicas médicas e odontológicas e hospitais.

## RESTRIÇÃO:

Não misturar com outros produtos. Restrito para áreas de assistência à saúde.

## MODO DE USAR:

Aplicar o produto puro sobre as superfícies com o auxílio de um pulverizador e/ou um pano limpo. Recomenda-se deixar o produto agir dentre 30 segundos a 1 minuto. Não é necessário enxágue.

## DILUIÇÃO:

Pronto uso.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>Aspecto:</b>	Líquido translúcido
<b>Cor:</b>	Incolor
<b>Odor:</b>	Característico álcool
<b>pH:</b>	6,0 a 8,0
<b>Peso específico (g.cm<sup>-3</sup>):</b>	0,8800 a 0,9900
<b>Composição:</b>	Diluyente, conservante, ativo, emolientes, agente de controle de pH, desnaturante
<b>Princípio ativo:</b>	Álcool etílico
<b>Teor de ativo (%):</b>	70,0

## VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 Meses

## EMBALAGEM:

Frasco 1 litro e galão 5 litros

## ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Não ingerir. Usar luvas, botas e óculos de proteção para sua aplicação. Evitar inalação ou aspiração. Evitar o contato com a pele e olhos.

Atualizado por: Matheus R. Sanches 22/06/2022